

Bruksanvisning

SÜDA Sprint 100




**Forhandler i Norge:
TECK-HO AS
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen**

Süda-Sprint er en moderne fotpleiemaskin med svært kompakte mål for tørrfotpleie. Den egner seg både til stasjonært og portabelt bruk. Den sliper negler, hardhud eller andre steder innen fotpleie.

Maskinens driftsfunksjoner vises på maskinens tydelige display. Du kan her enkelt avlese omdreiningstall, omdreiningensretning samt støv-avsugsfunksjonen. Du oppnår lett og hygienisk arbeid med muligheter for fininnstilling av omdreiningstall fra 6000 omdr./min. og helt opptil 40 000 omdr./min., samt en kraftig støvavsugsfunksjon med lavt støynivå.

I tillegg til støvoppsamlerpose sørger to finstøvfiltre på inn- og utgang for best mulig sikkerhet og velvære. I tillegg kan maskinen lagre de hyppigst brukte innstillingene dine.

Süda – Sprint 100 er utrustet med en lett og ergonomisk utformet presisjonshåndstykke. Med den sterke og vibrasjonsfattige mikromotoren i håndstykket blir arbeidet mer nøyaktig. Ombytte av fres er enkelt og raskt gjort ved at av/på-knapp befinner seg på håndstykket. Den medfølgende avsughylse på håndstykket er tilpasset for arbeid på hardhud med større fres-enheter. Som tilbehør finnes også hylse med dyseform som er beregnet for finere arbeid.

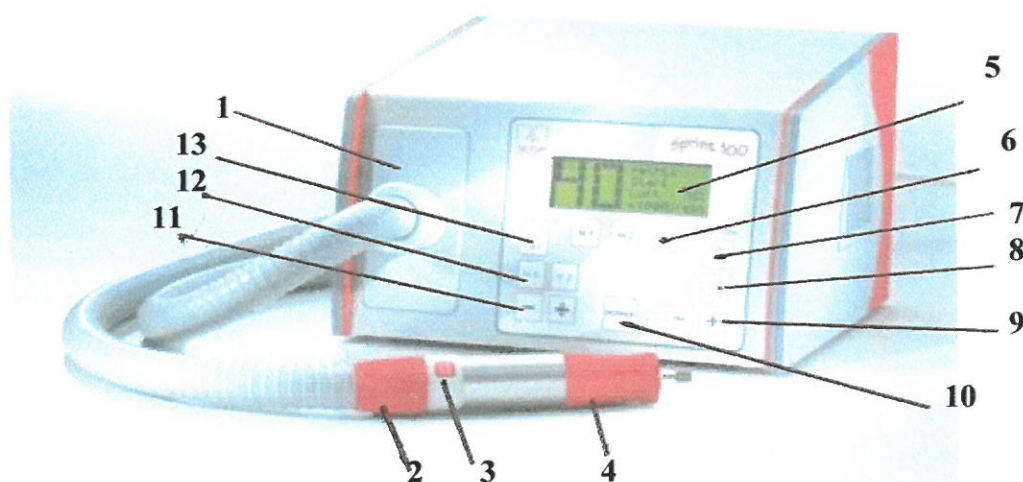

Funksjoner:

- 1) Innsugkammer
- 2) Håndstykke
- 3) Av/på-knapp for fres på håndstykke.
- 4) Avsughylse. Må skrues av for børsting av neglestøv.
- 5) Display
- 6) Lagringsknapper for omdreininger og støvsug-styrke (M1, M2, M3)
7. Av/på-knapp for fres (rotasjon)
- 8) Høyre / venstre-retning for fres
- 9) Regulering av omdreiningshastighet
- 10) Standby-knapp (power)
- 11) Regulering av støvsugstyrke
- 12) Lagringsknapp for støvsugstyrke
- 13) Av/på-knapp for støvsugfunksjon (vakuum)

I bruk:

1) Tilslutt håndstykke:

- a) Sett på støvpose på maskinens tilkoblingsenhet for håndstykke.
- b) Trekk støvposen helt inntil lokket.
- c) Sett på plass tilkoblingsenheten med påsatt støvpose mot maskinens innsugkammer.

2) Sett i fres:

VIKTIG: Fresen må alltid trykkes helt inn i håndstykke.

Kjør aldri håndstykke uten fres. Håndstykket kan da skades.

For sikkerhets skyld, påsett en fres eller blindstift i håndstykket når den ikke er i bruk.

- a) Sett i fres i fresholder på håndstykke. Skyv den helt inn i fresholder så den bunner. Om ikke fresen blir trykt helt inn blir bremsen ødelagt og fresen løsner eller stopper ved trykk (bruk).
Det må ikke brukes freser med en diameter over 6 mm.

3) Tilslutt nettspenning:

- a) Tilslutt nettkabel til maskinens nettinntak på baksiden.
- b) Sjekk at oppgitt nettspenning tilsvarer nettspenningen på ditt sted.
- c) Sett kontakten i støpselet.

Maskinen er nå klar til bruk.

Språkinnstilling:

Språket som vises i maskinens display kan endres. Slik går du frem for å endre språk:

- a) Slå av maskinen ved å sette av/på-hovedbryter på maskinens bakside på av (<0>).
- b) Trykk på lagringstasten M1 på forsiden, og hold denne inntrykket.
- c) Slå samtidig på maskinen ved å trykke av/på-hovedbryter på (<I>).
- d) Hold fremdeles knappen M1 inne, helt frem til displayet kommer på og det aktuelle/valgte språk fremkommer i dette display.
- e) Trykk deretter på + knappen for omdreiningsregulering (9) for å velge ønsket språk.
- f) Bekreft ønsket / valgt språk ved å trykke på av/på-knapp for rotasjon (7).

Alle innstillinger i displayet vil nå vises på det valgte språk.

Tips og anbefalinger:

- Arbeid aldri uten støvpose i maskinen.
- Festesystem i håndstykket er tilpasset DIN EN ISO 1797 – 1.
- Grip ikke om roterende instrumenter / fres. Fare for skade.
- For din sikkerhets anbefales bruk av hansker, beskyttelsesbrille og munnbind.
- Fres / instrument må rengjøres, desinfiseres og helst steriliseres før hver bruk.
- Bruk ikke makt ved bruk av fres. Bruk sideveis bevegelser, ikke oppover-/nedover bevegelser.



Süda Sprint 100 er utrustet med et høyhastighets presisjonshåndstykke. For å oppnå en problemfri drift over lang tid anbefaler vi følgende:

- Bruk av fres / instrumenter fra Süda anbefales.
- Påse at fres er tilstrekkelig og korrekt påsatt.
- Vær oppmerksom på uvanlige vibrasjoner i håndstykket. Sjekk i så fall om det er kast i fres / evt. reduser omdreiningene.
- Sjekk anbefalt max hastighet fra fresens produsent.
- Arbeid forsiktig ved høye omdreiningstall.
- Sett kun tørre og desinfeksjonsmiddelfrie fres i håndstykket.
- Rengjør håndstykket regelmessig.
- Skru ikke fra hverandre håndstykkets indre deler.

Rengjøring og pleie:

VIKTIG: Fjern nettleiding før rengjøring.

- Regelmessig rengjøring av håndstykket er nødvendig for problemfri drift.
- Klemstykke / håndstykkets indre deler må ikke demonteres.
- Dypp aldri håndstykket i væske.
- Håndstykket skal ikke rengjøres med vannmengder, kjemikalier, harde børster eller ultralyd.

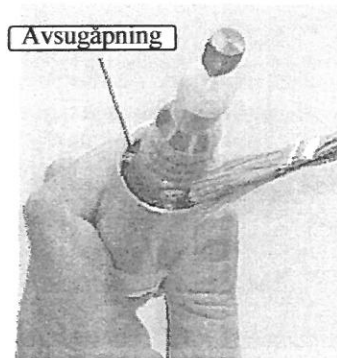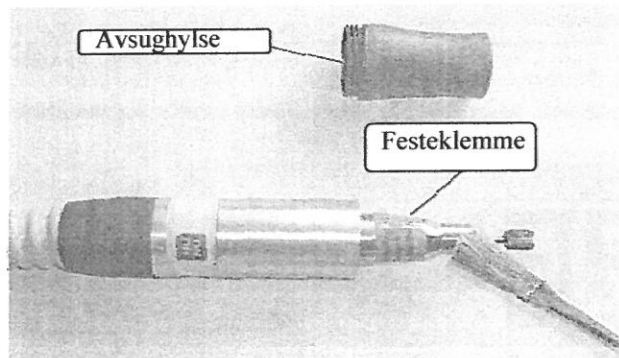

Ved intens bruk av håndstykket kan støvpartikler samle seg i håndstykket. Rengjør derfor håndstykket regelmessig, for derav å oppnå optimalt avsug og å skåne sugemotor.

- Skru av avsughylsen foran på håndstykket.
- Børst grundig av festeklemmen med en rengjøringspensel, spesielt foran på fresinngang. Demonter IKKE festeklemmen.
- Rengjør avsugsåpning i håndstykket.
- Rengjør avsughylsen med en fuktig klut evt. med et mildt rengjøringsmiddel, for eksempel Basillol plus (art.nr. 4616) eller med desinfeksjonsserviett ST-tissues (art.nr. 4617). Selve avsugshylse kan også rengjøres i ultralydbad.
- Skru tilbake den tørre avsugshylse tilbake på plass.

Betjening:

1) Slå på apparat:

- Slå på hovedbryter på apparatets bakside. I display vises først maskinens betegnelse / utgave. Dernest vises den innstilte verdi for omdreiningshastighet og retning for fres.

2) Innstill omdreiningshastighet:

- Trykk på + tasten for omdreiningsregulering for å øke hastigheten.
- Trykk på – tasten for omdreiningsregulering for å redusere hastigheten

I display vises den innstilte hastighet både nummerisk og som punkt-markører.

3) Regulering av avsug:

- Trykk på av/på-knappen for avsug (vakuum). Innstilt avsugstyrke vises i display. Innstilling foregår i 10 trinn.
- Trykk på + knappen for avsugregulering for å øke avsugstyrken.
- Trykk på – knappen for avsugregulering for å redusere avsugstyrken.

4) Start av håndstykke og avsug:

- Trykk på av/på knappen (rotasjon) for fres.
 - Fres går nå med innstilt hastighet.
 - Avsug går med innstilt hastighet.
 - Avsugstyrke og omdreiningshastighet kan reguleres mens den er i drift.

Viktig: Er avsugskraften blitt redusert må støvpose sjekkes med tanke på bytte av denne.

5) Vende retning på fres:

- Ikke arbeid med fres mens du skal endre retning! Vent til fres har endret retning før du fortsetter med arbeidet.
- Trykk på L/R knappen. I display vises fresens retning.

6) Inn og utkobling av håndstykket:

- Du har to muligheter for å igangsette håndstykket.
 - a) Trykk på av/på knappen (rotasjon) for fres på selve maskinen.
 - b) Trykk på av/på knappen på selve håndstykket.

7) Ombytte av fres:

- Stopp fres ved å trykke på av/på knapp på håndstykket.
- Vent til fres er stoppet.
- Trekk av fres som står i håndstykket.
- Sett inn ny fres. Påse at fres trykkes inn til anslag, slik at den ikke vil løsne under arbeid.
- Deretter kan fres slås på.

8) Innkobling / utkobling av avsug:

- Trykk på av/på knappen for avsug (vakuum). Fres går uavhengig av avsug.

9) Ombytte avsugshylse.

- Skru av avsugshylsen foran på håndstykket.
- Skru på den nye avsugshylsen.
- Rengjør avsugshylsen du har tatt av.

10) Slå av apparat:

- Trykk på power-knappen på maskinens forside. Maskinen står nå i standbymodus.
- Slå helt av med hovedbryteren på maskinens bakside.

Teknisk data:

Artikkelnr.	1950
Driftsspenning.	230V -/50/60 Hz
Ytelse:	350 w
Omdreiningstall:	6 000 – 40 000 omdr/min
Sikringer:	2 x 3,15 A t
Klassifisering	1
Spenn/festesystem:	Passer for fres tilhørende DIN EN ISO 1797 – 1
Ytre mål (BxHxD):	220 x 140 x 180 med mer
Vekt håndstykke:	150g
Vekt maskin inkl.	Håndstykke: 3.36 kg.